

深呼吸するように、心と体に安らぎを



ヘルスケア / ペット



マイナスイオン



アロマ使用可※

OC-1T | 1~5L/分

幅広い流量調整が可能
(濃度は流量に連動)

OC-3T | 1~3L/分

流量に関わらず安定した
高濃度供給を実現

業務用小型高濃度酸素発生器


O₂Recovery
miniシリーズ

3つのこだわり

01 最大酸素濃度90%±3

気道内の酸素濃度を高めるためには、「高濃度」であることが必要です。

本機は**最大酸素濃度90%±3**という高出力を実現。
目的とする酸素吸入環境をしっかりサポートします。

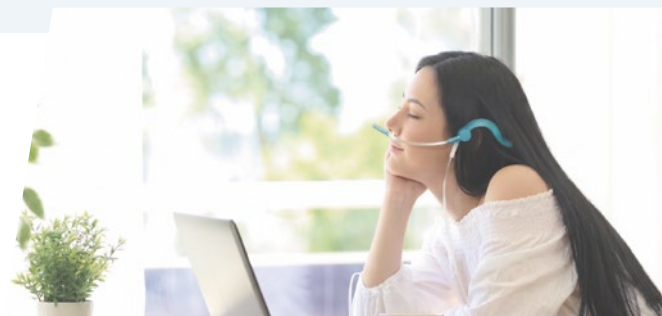

02 軽量設計で、移動も設置もラクラク

洗練されたコンパクトなデザインと、取っ手付きの軽量設計を実現。
リビングから寝室、デスクサイドまで、必要な場所へ手軽に
持ち運べる高い機動力が魅力です。



03 安心のアフターサポート

PSEマーク適合に加え、国内の製造基準に準拠した厳格な品質管理を行っています。
自社工場での一貫生産と専属エンジニアによる万全のサポート体制で、初めての方でも安心して
末永くお使いいただけます。

安全基準の
PSE マーク




※アロマは必ず精油(エッセンシャルオイル)をご使用ください。他オイルは加湿ボトル破損の原因となります。

商品仕様

製品仕様形式	OC-1T	OC-3T
流量調整範囲	1~5L/分	1~3L/分
出力酸素濃度	90%±3% (1L/分) 55%±3% (2L/分) 35%±3% (3~4L/分) 30%±3% (5L/分)	90%±3%
重量	7.8kg	8.5kg
消費電力	160W	220W
リモコン	×	○
タイマー機能	○	○

- 洗練されたコンパクトなデザイン
- 持ち運びに便利なグリップ(持ち手)付き

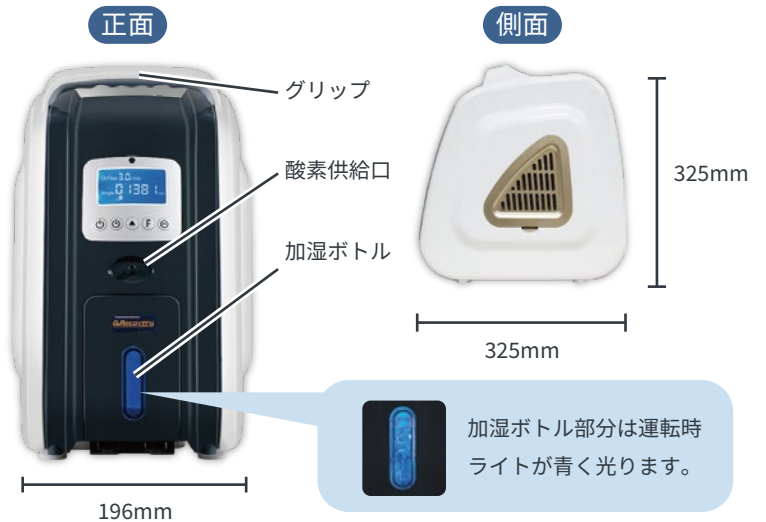

※サイズは OC-1T、OC-3T 共通となります。

よくある質問

Q 酸素発生器を選ぶポイントは何ですか？

A 酸素濃度 (%) と流量 (L/分) が重要です。
吸入時に周囲の空気と混ざり濃度が下がるため、
目的に応じて十分な性能を備えた、高濃度かつ
高流量な製品を選ぶことが大切になります。

Q 長時間稼働できますか？

A 24 時間連続運転可能です。
ただし、より長く安定してお使い頂くために、
1 日 1 回程度、数時間の休止時間を設けていた
だくことを推奨しております。

Q 消耗品はありますか？

A はい、あります。
ゼオライトは消耗品です。
定期的に交換することでより長く安心して
お使い頂けます。

Q 具体的にはどんな性能を確認して
購入すればいいですか？

A 高濃度酸素供給が可能な 1~8L/ 分の製品が
理想的です。十分な性能を持つ 1L 製品に加え、
より高い摂取量が必要な場合は流量の大きい
製品を選びましょう。

付属品



- ①ヘッドホン式カニューラ 1 個
- ②酸素吸入チューブ 長・短 各 1 本
- ③水滴貯留カプセル 1 個
- ④交換用ヒューズ 1 個
- ⑤内部フィルター 1 個
- ⑥吸気フィルター 2 枚
- ⑦電源コード 1 本
- ⑧リモコン※OC-3T のみ 1 台

商品ページ
はこちら



製造販売業者

有限会社エクセルプラン

〒651-1505

兵庫県神戸市北区道場町日下部1716

販売元